

Краткое руководство пользователя

Система контроля уровня глюкозы в крови (глюкометр) портативная «УанТач Селект Плюс Флекс» (OneTouch Select Plus Flex®)

В этом руководстве приведены краткие сведения о глюкометре и его основных функциях.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: прочитайте краткое руководство пользователя, прилагаемое к глюкометру.



AW 07054404A

ONETOUCH®

1

Установка даты и времени в глюкометре

Включите глюкометр

Нажмите кнопку **OK** и удерживайте ее до появления экрана загрузки.

С помощью кнопок **↓** и **↑** задайте требуемое значение каждого параметра, затем нажмите **OK** для подтверждения.

Установите время на первом экране настройки

> Значение часов мигает. После внесения изменений нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

> Значение минут мигает. После внесения изменений нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

Установите дату на следующем экране настройки


> Значение года мигает. После внесения изменений нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

> Значение месяца мигает. После внесения изменений нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

> Значение дня месяца мигает. После внесения изменений нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

Глюкометр готов к работе


Появление экрана с 3 горизонтальными черточками указывает на завершение настройки глюкометра.

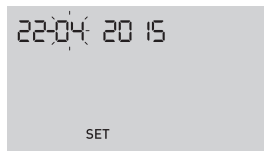

2

Проверка

Контактные полосы

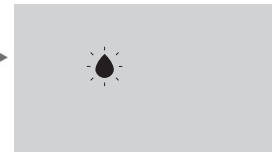


Появляется мигающее изображение капли.


Зона для ввода тест-полоски

Введите тест-полоску в порт для ввода тест-полоски, как показано на рисунке, чтобы сторона с контактными полосами была обращена к вам.

Капилляр

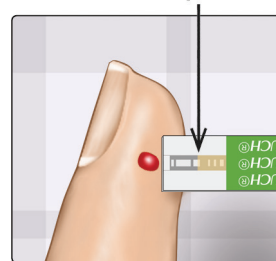

Контрольное поле заполнено

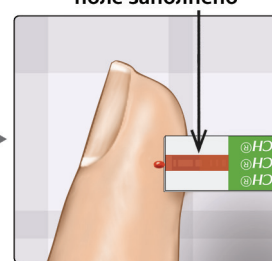

Поднесите тест-полоску к капле крови так, чтобы капилляр на поперечном срезе тест-полоски слегка коснулся капли крови.

Капля крови втянется в капилляр тест-полоски, при этом контрольное поле должно полностью заполниться.

3

Получение результатов



Пример результата в пределах диапазона

Результат отображается на экране. Стрелка индикатора диапазона указывает на синюю, зеленую или красную полосу, что соответствует результатам ниже, в пределах или выше установленного диапазона.



Пример результата ниже диапазона



Пример результата выше диапазона

4

Дополнительная функция: подключение к мобильному устройству


Глюкометр поддерживает технологию Bluetooth®. Она обеспечивает беспроводную передачу результатов на мобильное устройство, например на телефон или планшет, для просмотра или графического представления результатов.


Дополнительные сведения о беспроводном подключении к глюкометру, а также полный список поддерживаемых устройств и мобильных приложений. см. на веб-сайте www.onetouch.ru.

Подключение глюкометра

Одновременно нажмите кнопки **OK** и **↑**, чтобы включить (или отключить) функцию Bluetooth®. При отображении запроса на мобильном устройстве введите ПИН-код, указанный на экране глюкометра.



Значок  указывает на то, что функция Bluetooth® включена.

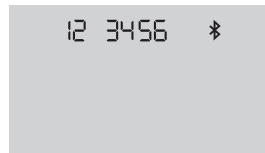

Пример ПИН-кода.

Символы на экране глюкометра


	Включение глюкометра		Функция Bluetooth® включена
	Низкий заряд батареек		Режим просмотра результатов предыдущих измерений
	Батарейка разряжена		Нанесение образца
	Контрольный раствор		Стрелка индикатора диапазона
	Синхронизация	SET	Режим настройки

Об индикаторе диапазона

Глюкометр имеет индикатор, указывающий, в каком диапазоне находится результат: ниже диапазона, в пределах диапазона, выше диапазона. Верхний и нижний пределы диапазона предварительно заданы следующим образом:



Предустановленная нижняя граница диапазона

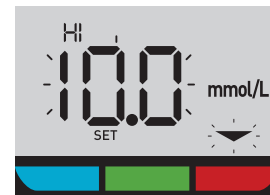

Предустановленная верхняя граница диапазона

Если вы хотите изменить предустановленные границы диапазона в соответствии с вашими индивидуальными целевыми показателями уровня глюкозы в крови, см. руководство пользователя.

Наименование и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими корпорации Bluetooth SIG, Inc., и используются компанией LifeScan Scotland Ltd. по лицензии. Другие товарные знаки и фирменные наименования являются собственностью соответствующих владельцев.



Дата редакции макета: 06/2023
© 2018–2023 LifeScan IP Holdings, LLC
AW 07054404A
Plus - Плюс.



Производитель:
«ЛайфСкан Юроп ГмбХ»
Даммштрассе 19
6300 Цуг, Швейцария
LifeScan Europe GmbH
Dammstrasse 19
6300 Zug, Switzerland

Уполномоченный представитель в России:
000 «ЛайфСкан Раша»
Российская Федерация, 121614
г. Москва
ул. Крылатская, д. 17, корп. 4, эт. 2
пом. 1, ком. 2

Горячая линия OneTouch®: 8-800-200-83-53
(звонок по России бесплатный).
www.onetouch.ru

ONETOUCH®

Lifescan™